

機械器具 39 医療用鉗子
 一般医療機器 歯科矯正用プライヤー JMDNコード 33209000
DXユーティリティプライヤー

【禁忌・禁止】**

ニッケル及びクロムに対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

形状、構造の違いにより以下の種類があります。

1. ホウプライヤー



インサート(3mm)
(805-110I)

ノンインサート(4mm)
(805-1100)

2. ナンスクロージングプライヤー



(805-2030)

3. ユーティリティプライヤー



ノーマル
(805-2130)




インサート
(805-213I)

4. シンチバックユーティリティプライヤー



45° タイプ
(805-5030)

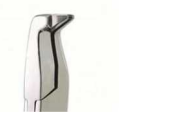

90° タイプ
(805-5020)

材質：ステンレス鋼、鋼材、超硬合金

【使用目的又は効果】

用途に応じて様々な形状をもつ小型のペンチで、歯列矯正装置の金属片又はワイヤを屈曲するために用います。

【使用方法等】

- (1) 目的に合ったプライヤーを選択してください。
- (2) 先端で金属片又はワイヤを把持し、屈曲又は成形してください。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) 口腔内で屈曲又は成形する際は、本品で口腔粘膜を挟んだりワイヤ等で粘膜を傷つけないよう注意してください。
- (2) 屈曲することができるワイヤのサイズはカタログに掲載されていますのでご確認ください。

【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品です。
- (2) 本品を使用する前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）を行ってください。
- (3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬してください。
- (4) 先端部の二次加工（改造）を行うと破損等の原因となるので絶対に行わないでください。
- (5) 本品の使用により、発疹や皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせてください。
- (6) 医療従事者のみが使用してください。
- (7) 廃棄する際は、地域の規則に従ってください。

2. 不具合・有害事象

- (1) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】**

〔保管方法〕

- (1) 保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥後に直射日光、紫外線を避け、常温、常湿で保管してください。
- (2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】**

〔使用前・使用後の点検〕

本品に変形、がたつき、損傷、腐食等が無いか確認してください。これらの不具合がある場合には使用を中止してください。

〔洗浄〕

- (1) 洗浄前に水分、付着物等は使い捨てのペーパータオルで拭き取ってください。
- (2) 洗浄は中性洗剤もしくは溶液を用い、傷が付かないよう柔らかいブラシで本品の表面および接合部を磨いてください。
- (3) 洗浄後は清潔な流水で濯ぎ、再度、精製水で超音波洗浄し、腐食防止のために直ちに乾燥してください。
- (4) 洗浄及び乾燥後は、本品に損傷や腐食が無いか確認してください。

〔滅菌〕

- (1) 複数の器具を滅菌する場合には、損傷の原因となることがあるので、接触しないよう注意してください。
- (2) 滅菌にあたっては、滅菌器メーカーの取扱説明書の指示に従って行ってください。

[保守・点検に関する注意事項]

- (1) 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用してください。水道水を使用すると塩素イオンの影響で本品が腐食するおそれがあります。
- (2) 本品の滅菌は、以下表を参照してください。プラズマ滅菌は素材に影響を及ぼすことがあるので、使用しないでください。

	滅菌方法
805-2030	高圧蒸気滅菌 乾熱滅菌 ガス滅菌
805-2130	
805-213I	
805-5020	
805-5030	

	滅菌方法
805-110I	乾熱滅菌
805-1100	ガス滅菌

- (3) 薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ってください。薬剤の種類によっては素材に影響を及ぼすことがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：トミー株式会社

 TEL 042-363-1151
<http://www.tomyinc.co.jp/>

発売元：TOMY INTERNATIONAL INC.[®]

 株式会社 トミー インターナショナル
 TEL 03-3258-2231
<http://www.tomy-ortho.co.jp/>

製造元：Colte(`)ne/Whaledent Inc., (アメリカ合衆国)